

SKRÓCONA INSTRUKCJA INOGEN G2



URUCHOMIENIE I KOŃCZENIE PRACY

Koncentrator może pracować zarówno tylko z baterii, jak i podłączony do zasilacza, uruchomienie, ustawienia i wyłączenie przebiega identycznie.

Aby włączyć, przytrzymujemy przez chwilę (aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego) przycisk:



Po uruchomieniu, koncentrator jest gotowy do pracy i można zacząć z niego korzystać.

Podczas pracy na wyświetlaczu będzie widniał napis „setting: 1” gdzie cyfra oznacz ilość tlenu.

Każdy z poziomów 1-6 w trybie pulsacyjnym, jest równoważny z przepływem oznaczonym w litrach jak to ma miejsce w koncentratorach stacjonarnych o przepływie ciągłym.

Aby zmienić ilość podawanego tlenu, wciskamy przycisk „+” by zwiększyć ilość tlenu lub „-” by zmniejszyć ilość tlenu.

Koncentrator używamy TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KRÓTKĄ KANNIULĄ (do 2,5m) I BEZ NAWILŻACZA

Wyłączanie koncentratora przebiega analogicznie jak uruchomienie, wciskamy przycisk zasilania przez chwilę aż do pojawienia się sygnału dźwiękowego, na ekranie pojawi się komunikat „shutting down, please wait” po kilku sekundach koncentrator się wyłączy.

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Każdorazowo po użyciu, można (ale nie ma konieczności) podłączyć do zasilacza by utrzymać akumulator w pełni naładowany.

Konieczne podłączenie do ładowania jest w przypadku, gdy poziom akumulatora osiągnie poziom 25% i niżej.

Naładowanie akumulatora sygnalizowane jest na ekranie komunikatem „100%” lub „battery full”

W pełni naładowany akumulator pozwala na pracę do **4h**

TRANSPORT

Używać w podróży koncentrator można na dwa sposoby:

-na wózku transportowym - torbę zakładamy na wózek przekładając gumową opaskę oraz rączkę przez uchwyt wózka, rączkę wózka wysuwamy poprzez wciśnięcie przycisku na rączce i wyciągnięcie jej do oporu, chowamy analogicznie.

-na pasku na ramię, zakładamy tak, jak torebkę i można ruszać w drogę ☺

DODATKI

Do zestawu dołączony jest także zasilacz samochodowy, wtyczka pasuje do gniazda zapalniczki, gdzie możemy jednocześnie ładować akumulator i używać koncentrator w trasie.